

抗酸菌検出用緩衝液

リン酸緩衝液 “ニチビー”

【形状・構造等】

1/30 mol/Lリン酸緩衝液 (pH 6.8)

【使用目的】

アルカリ処理検体の希釈中和

【操作方法】

- 1) NaOHを主剤とする、前処理液「CC-E “ニチビー”」や前処理剤NALC-NaOH等で前処理した検体に本品を検体の5倍以上添加し、遠心分離する。
- 2) 遠心分離後の沈渣を取り、これに本品0.5mLを添加し再懸濁させ培地に接種する。

【使用上又は取扱い上の注意】

- 1) 本品は、分注後に高圧蒸気滅菌をしてある。無菌状態での使用のため雑菌汚染させないように、取り扱いには十分注意すること。
- 2) 開封したものは、すみやかに使い切る。使い残した場合、雑菌汚染されている可能性があるため、フタをゆるめて再度高圧蒸気滅菌してから使用すること。
- 3) 検査に使用した器具類や使用後の試薬・培地等は、必ず滅菌してから適切な処理を行うこと。
- 4) 病原性微生物の取り扱いに習熟した者の指導のもと、安全管理に注意して取り扱うこと。
- 5) 使用期限に注意し、期限切れの本品は使用しないこと。

【貯蔵方法・使用期間】

- 1) 貯蔵方法 室温保存
- 2) 使用期間 1年間

【包装単位】

500mL 4本

※、※※【お問い合わせ先】

日本ビーシージー製造株式会社 カスタマーセンター

〒112-0012 東京都文京区大塚一丁目5番21号

TEL (03) 5395-5590 FAX (03) 5395-5580